


Sug & Pust, Kalibrering af den infrarøde- føler.

Sug & Pust systemet er kalibreret fra fabrikken, ved behov kan en ekstra kalibrering foretages hos brugeren.

Ved kalibreringen indstilles den infrarøde følers afstand for "TIL" og "FRA".

Punktet midt mellem "TIL" og "FRA" er positionen for brydning.

- Åben elektronik-boksen til Sug & Pust-enheden og find kontakten for SET-UP og lysdioden (LED) (Figur. 1).
- Tænd Drivelink-systemet samtidigt med at kontakten for SET-UP holdes nede. Den røde lysdiode(LED) lyser nu. Slip kontakten. Kalibreringen af den infrarøde føler er startet.
- Brugeren flytter læberne lidt væk fra føleren, dette er placeringen for "FRA" (Figur. 2). I denne position skal føleren kalibreres til placering "FRA", Tryk på SET-UP kontakten igen. Så skal den røde lysdiode (LED) slukke.
- Brugeren flytter læberne tættere på føleren, dette er placeringen for "TIL" (Figur. 3). I denne position skal føleren kalibreres til placering "TIL", Tryk på SET-UP kontakten igen. Så skal den røde lysdiode (LED) lyse.
- Hvis lysdioden begynder at blinke under kalibreringen, kan det være at positionen for "TIL" eller "FRA" ikke var optimal. Prøv kalibrering af føleren igen.
- Sluk for Drivelink-systemet og luk elektronik-boksen igen.
- Kalibreringen er nu klar og Sug & Pust-systemet er klar til brug.

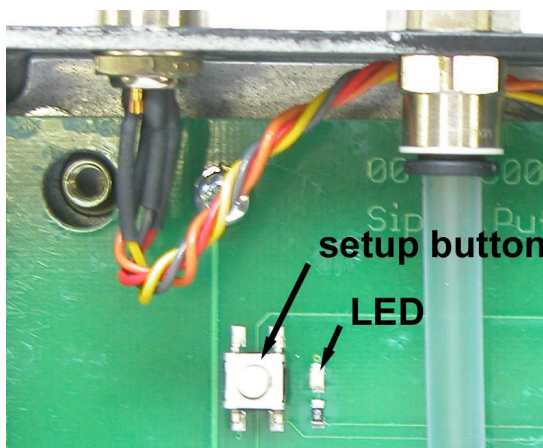

(Figur. 1).



(Figur. 2).



(Figur. 3).